

LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE

ETUI

Face principale :

DEGAGE NATURELLEMENT LE NEZ
ACTION RAFRAICHISSANTE

A base d'huiles essentielles
MENTHE POIVREE
EUCALYPTUS
THYM
ROMARIN

Adultes et enfants dès 12 ans

SPRAY NASAL

DISPOSITIF MEDICAL

Autres faces :

LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché est un dispositif médical. Il s'agit d'un spray nasal préconisé en cas d'encombrement nasal lors d'un rhume, d'une rhinite ou d'une sinusite. Dès les premiers symptômes, il dégage le nez et facilite l'élimination des sécrétions nasales par drainage pour assurer un soulagement durable.

Voie d'administration :

A usage local uniquement.

Conseils d'utilisation :

Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 12 ans.
2 à 3 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

Le cadre d'utilisation du produit ne justifie pas un traitement prolongé.
En cas d'absence d'amélioration au bout de 5 jours et/ou d'aggravation des symptômes et/ou de fièvre élevée ou persistante, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 12 ans.
Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
Ne pas réutiliser en cas de réaction allergique.
De légers picotements peuvent être ressentis temporairement après la prise.
Si le trouble persiste ou s'aggrave, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
L'action du produit peut entraîner un écoulement nasal, ne pas réutiliser le produit durant cette période.

LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTION AVANT UTILISATION.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Conditions de conservation : Ne pas utiliser plus de 30 jours après la 1^{ère} utilisation et si le flacon est abîmé.
A conserver à température ambiante. Ne pas mettre au réfrigérateur.

Composition :

Glycérol, hydroxypropylcellulose, eau, huiles essentielles (excipients) de : *Mentha piperita* (Menthe poivrée), *Eucalyptus globulus* (Eucalyptus), *Thymus satureioides* (Thym), *Rosmarinus officinalis* (Romarin).

Sans conservateur.

Sans gaz propulseur.

Flacon plastique de 15 mL

Fabricant:

Vitrobio SAS

ZAC de Lavour

63500 Issoire

France

Distributeur :

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

France

Information médicale et matériovigilance : Tél. : France 0800 50 20 45 (Service & appel gratuits) / Outre-Mer et Etranger (+33) 3 21 18 22 70

Dernière révision : Octobre 2019.

Année d'apposition du marquage CE : 2015.

CE

LOT

Numéro du lot :



Date d'expiration :

Fabriqué en France

Code ACL : 3585550000023

ETIQUETTE

Partie centrale :

DEGAGE NATURELLEMENT LE NEZ
ACTION RAFRAICHISANTE

A base d'huiles essentielles
MENTHE POIVREE
EUCALYPTUS
THYM
ROMARIN

Adultes et enfants dès 12 ans

SPRAY NASAL

DISPOSITIF MEDICAL

Partie droite :

Voie d'administration :

A usage local uniquement.

Conseils d'utilisation :

2 à 3 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

Le cadre d'utilisation du produit ne justifie pas un traitement prolongé.

En cas d'absence d'amélioration au bout de 5 jours et/ou d'aggravation des symptômes et/ou de fièvre élevée ou persistante, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne pas réutiliser en cas de réaction allergique.

LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTION AVANT UTILISATION.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Conditions de conservation : Ne pas utiliser plus de 30 jours après la 1^{ère} utilisation et si le flacon est abîmé.

A conserver à température ambiante. Ne pas mettre au réfrigérateur.

Composition :

Glycérol, hydroxypropylcellulose, eau, huiles essentielles (excipients) de menthe poivrée, eucalyptus, thym, romarin.

Sans conservateur.

Sans gaz propulseur.

Fabricant :

Vitrobio SAS

ZAC de Lavour

63500 Issoire
France

Distributeur :

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

Information médicale et matériovigilance : Tél. : France 0800 50 20 45 (Service & appel gratuits) / Outre-Mer et
Etranger (+33) 3 21 18 22 70

15 mL

Révision : Octobre 2019.

Apposition CE : 2015.

CE

LOT

Numéro du lot :



Date d'expiration :

Notice d'instruction

LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE SPRAY NASAL - ADULTES

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le dispositif médical LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché. Elle contient des informations importantes relatives à l'utilisation de ce dispositif médical. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice d'instruction :

1. Qu'est-ce que LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché ?
3. Comment utiliser LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché ?
6. Contenu de LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché

1. QU'EST-CE QUE LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché est un dispositif médical. Il s'agit d'un spray nasal préconisé en cas d'encombrement nasal lors d'un rhume, d'une rhinite ou d'une sinusite. Dès les premiers symptômes, il dégage le nez et facilite l'élimination des sécrétions nasales par drainage pour assurer un soulagement durable.

LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché est une solution hypertonique qui dégage naturellement les voies nasales :

- Le glycérol favorise l'élimination des sécrétions nasales et protège les muqueuses des agressions.
- Les huiles essentielles de menthe poivrée, eucalyptus, thym et romarin, grâce à leurs propriétés rafraîchissantes, apportent une sensation immédiate de bien-être.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE ?

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché chez l'enfant de moins de 12 ans.

Ne pas utiliser LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne pas réutiliser LES ELEMENTAIRES Nez Très Bouché en cas de réaction allergique.

De légers picotements peuvent être ressentis temporairement après la prise.

Si le trouble persiste ou s'aggrave, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'action du produit peut entraîner un écoulement nasal, ne pas réutiliser le produit durant cette période.

En cas d'absence d'amélioration au bout de 5 jours et/ou d'aggravation des symptômes et/ou de fièvre élevée ou persistante, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Grossesse et Allaitement :

La sécurité chez la femme enceinte ou allaitante n'a pas été établie. En l'absence de données suffisantes, l'utilisation de ce produit n'est pas recommandée pendant la grossesse ou en cours d'allaitement.

3. COMMENT UTILISER LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE ?

Voie d'administration :

A usage local uniquement.

Conseils d'utilisation :

Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 12 ans.

2 à 3 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

Le cadre d'utilisation du produit ne justifie pas un traitement prolongé.

En cas d'absence d'amélioration au bout de 5 jours et/ou d'aggravation des symptômes et/ou de fièvre élevée ou persistante, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Mode d'emploi :


1- Se moucher

2- Secouer le flacon et enlever le bouchon protecteur

3 – Lors de la 1^{ère} utilisation, amorcer la pompe en effectuant 1 ou 2 pressions (jusqu'à obtention d'un fin nuage de produit)

4 - Introduire l'embout nasal dans une narine et fermer l'autre en appuyant avec un doigt. Procéder à 2 ou 3 pulvérisations dans chaque narine, en inspirant.

6- Après utilisation, nettoyer l'embout à l'eau chaude et le sécher, puis remettre le bouchon en place.

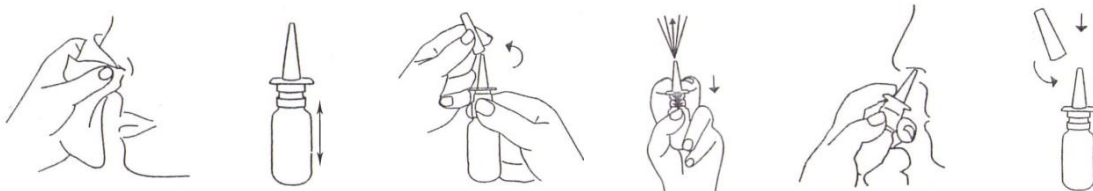

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

De légers picotements peuvent être ressentis temporairement après la prise.

Si le trouble persiste ou s'aggrave, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'action du produit peut entraîner un écoulement nasal, ne pas réutiliser le produit durant cette période.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE ?

Tenir ce dispositif médical hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas l'utiliser après la date de péremption figurant sur l'étui et sur le côté du flacon, plus de 30 jours après la 1^{ère} utilisation et si le flacon est abîmé.

A conserver à température ambiante. Ne pas mettre au réfrigérateur.

6. CONTENU DE LES ELEMENTAIRES NEZ TRES BOUCHE

Composition :

Glycérol, hydroxypropylcellulose, eau, huiles essentielles (excipients) de : *Mentha piperita* (Menthe poivrée), *Eucalyptus globulus* (Eucalyptus), *Thymus satureioides* (Thym), *Rosmarinus officinalis* (Romarin).

Sans conservateur.

Sans gaz propulseur.

Flacon plastique de 15 mL.

Fabricant:

Vitrobio SAS

ZAC de Lavour
63500 Issoire
France

Distributeur :

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

Information médicale et matériovigilance : Tél. : France 0800 50 20 45 (Service & appel gratuits) / Outre-Mer et
Etranger (+33) 3 21 18 22 70

Dernière révision de la notice : Octobre 2019.
Année d'apposition du marquage CE : 2015.

CE

