



FERVEX®

NEZ BOUCHÉ

Spray Nasal ISOTONIQUE ENFANTS

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le dispositif médical Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants. Elle contient des informations importantes relatives à l'utilisation de ce dispositif médical. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice d'instruction :

1. Qu'est-ce que Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants ?
3. Comment utiliser Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants ?
6. Contenu de Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants

1. QU'EST-CE QUE FERVEX NEZ BOUCHÉ - SPRAY ISOTONIQUE ENFANTS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants est un dispositif médical préconisé pour l'hygiène quotidienne du nez ou en cas d'encombrement nasal lors d'un rhume ou d'une rhinite des jeunes enfants et nourrissons. Il permet de nettoyer et libérer le nez pour faciliter la respiration.

Son eau de mer isotonique 100% naturelle, riche en oligo-éléments et sans conservateur, facilite l'évacuation des sécrétions et l'humidification de la muqueuse nasale.

Son application par micro-diffusion et son embout spécifique nourrissons et jeunes enfants permettent un lavage tout en douceur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER FERVEX NEZ BOUCHÉ - SPRAY ISOTONIQUE ENFANTS ?

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants chez le nourrisson de moins de 3 mois.

Ne pas utiliser Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants en cas d'allergie à l'un des composants.

Ne pas réutiliser Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants en cas de réaction allergique.

Par mesure d'hygiène, il est recommandé de nettoyer l'embout à l'eau chaude et de le laisser sécher à l'air libre entre chaque usage.

En cas d'absence d'amélioration au bout de 7 jours, consultez votre médecin.

Grossesse et Allaitement :

Fervex Nez Bouché - Spray Isotonique Enfants peut être utilisé chez la femme enceinte ou en cours d'allaitement.

3. COMMENT UTILISER FERVEX NEZ BOUCHÉ - SPRAY ISOTONIQUE ENFANTS ?

Voie d'administration :

A usage local uniquement.

Conseils d'utilisation :

Réservé au jeune enfant et au nourrisson à partir de 3 mois.

Pour une hygiène quotidienne, 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine le matin et le soir.

En cas de rhume ou de rhinite, 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

En cas d'absence d'amélioration au bout de 7 jours, consultez votre médecin.

Mode d'emploi :

1 - Moucher le nez de l'enfant ou se moucher.

2 - Secouer le flacon et enlever le bouchon protecteur.

3 - Introduire l'embout nasal dans une narine et fermer l'autre en appuyant avec un doigt. Exercer 1 à 2 brèves pressions sur l'embout.

4 - Renouveler l'opération dans l'autre narine.

5 - Après utilisation, nettoyer l'embout à l'eau chaude et le laisser sécher à l'air libre, puis remettre le bouchon en place.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

A ce jour, aucun effet indésirable n'a été rapporté avec ce produit.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou au fabricant du produit.

5. COMMENT CONSERVER FERVEX NEZ BOUCHÉ - SPRAY ISOTONIQUE ENFANTS ?

Tenir ce dispositif médical hors de la portée et de la vue des enfants.

Attention

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas mettre au four à micro-ondes.

Ne pas l'utiliser après la date de péremption figurant sur l'étui et sous le flacon et si le flacon est abîmé.

6. CONTENU DE FERVEX NEZ BOUCHÉ - SPRAY ISOTONIQUE ENFANTS

Composition :

Eau de mer 31,82 %.

Eau purifiée q.s.p. 100 %.

Formule ajustée en fonction de l'osmolalité de l'eau de mer.

Sans conservateur.

Gaz propulseur (Azote) sans contact avec le produit.

Flacon de 100 mL.

Dernière révision de la notice : Décembre 2015.

Année d'apposition du marquage CE : 2015.

Information médicale et matériovigilance :

Tél. : France 0810 410 500 (Service 0,06 €/min + prix appel) / Outre-Mer et Etranger (+33) 1 58 83 84 96

Fabricant : UPSA SAS - 3, rue Joseph Monier - 92500 RUEIL-MALMAISON

Distributeur : UPSA SAS - Z.I. La Plaine - 47520 LE PASSAGE



0459

1364922 - ANA90BM02B

